

Apirectum

Ορθικά υπόθετα με υαλουρονικό νάτριο και πρόπολη

Φύλλο Οδηγιών Χρήσης

1. Περιγραφή προϊόντος
2. Συστατικά
3. Δράση
4. Προτεινόμενη χρήση
5. Οδηγίες χρήσης
6. Προειδοποιήσεις
7. Φύλαξη
8. Συσκευασία
9. Παρασκευαστής
10. Διακίνηση

1. Περιγραφή προϊόντος

Τα ορθικά υπόθετα **Apirectum** με υαλουρονικό νάτριο και πρόπολη, αποτελούν ιατροτεχνολογικό προϊόν σε τέτοια μορφή, ώστε να διευκολύνει την τοπική χρήση τους στον πρωκτό.

Κάθε υπόθετο έχει βάρος 2 g και περιέχει:

- 10 mg υαλουρονικό οξύ ως νατριούχο άλας (sodium hyaluronate)
- 50 mg πρόπολη ως αιθανολικό εκχύλισμα πρόπολης (ethanolic extract of propolis)

Τα υπόθετα σφραγίζονται σε συσκευασία τύπου Blister (κυψέλη) με χρήση πλαστικών φύλλων περιτυλίγματος. Οι κυψέλες διαχωρίζονται μεταξύ τους με διάτρητες γραμμές που επιτρέπουν σε κάθε υπόθετο να αποσπάται εύκολα. Κάθε υπόθετο μπορεί να αφαιρεθεί από το περιτύλιγμά του ξεκολλώντας τα δυο πλαστικά πτερύγια περιτυλίγματος. Όταν το υπόθετο εισέλθει στον πρωκτικό δακτύλιο, τότε αυτό λιώνει και δημιουργεί μια ιξωδοελαστική γέλη με ενυδατικές και φραγματικές ιδιότητες.

2. Συστατικά

Υαλουρονικό νάτριο, αιθανολικό εκχύλισμα πρόπολης, πολυοξυαιθυλενογλυκόλες

3. Δράση

Μετά την εφαρμογή, το υπόθετο λιώνει στον πρωκτό και παράγει μια υψηλού ιξώδους (παχύρρευστη) υδρογέλη που επικαλύπτει την βλεννογόνο μεμβράνη του πρωκτού. Το υαλουρονικό οξύ δεσμεύει τις εκκρίσεις του πρωκτικού βλεννογόνου για να δημιουργήσει μια ιξωδοελαστική μεμβράνη στην επιφάνειά του. Η μεμβράνη που δημιουργείται:

- έχει ενυδατικές ιδιότητες
- προστατεύει τον πρωκτικό βλεννογόνο
- παρέχει ένα περιβάλλον που ευνοεί την ενεργοποίηση των φυσικών αντιφλεγμονωδών και αναγεννητικών μηχανισμών
- προωθεί την γρήγορη επούλωση των πρωκτικών ραγάδων/σχισμών και επαναφέρει την φυσιολογική κατάσταση του πρωκτικού επιθηλίου.

4. Προτεινόμενη χρήση

Το προϊόν προορίζεται για:

- επαναφορά στην φυσιολογική κατάσταση του πρωκτικού βλεννογόνου, ιδιαίτερα σε ασθενείς που έχουν διαγνωσθεί με παρουσία εσωτερικών και εξωτερικών αιμορροΐδων.
- επιτάχυνση της επούλωσης των ραγάδων και σχισμών του πρωκτικού βλεννογόνου
- ανακούφιση από συμπτώματα που προκαλούνται από συρίγγια πρωκτού

- προεγχειρητική θεραπεία σε χειρουργικές ενδοπρωκτικές επεμβάσεις, με σκοπό την αποφυγή φλεγμονής και πόνου
- επιτάχυνση ιστικής αναγέννησης μετά από πρωκτική χειρουργική επέμβαση.

5. Οδηγίες χρήσης

Ανάλογα με την ένταση των πρωκτικών ραγάδων/πληγών ,χρησιμοποιήστε 1 υπόθετο 1-2 φορές ημερησίως, Εισχωρήστε το υπόθετο στον πρωκτό ,μετά την αφόδευση, κατά προτίμηση πριν την νυχτερινή κατάκλιση.

Η εφαρμογή των υπόθετων γίνεται για χρονική περίοδο 5-10 ημερών , μέχρι την ανακούφιση των συμπτωμάτων στην πρωκτική περιοχή. Σε περίπτωση εφαρμογής 2 υπόθετων ημερησίως, εφαρμόστε 1 υπόθετο το πρωί και 1 υπόθετο το βράδυ.

Για να αφαιρέσετε το υπόθετο από το φύλλο περιτυλίγματος:

- αποσπάστε μια κυψέλη που περιέχει το υπόθετο σκίζοντας κατά μήκος των διάτρητων γραμμών
- διαχωρίστε τα δυο πλαστικά πτερύγια περιτύλιξης και ξεκολλήστε τα απαλά
- αφαιρέστε το υπόθετο και τοποθετήστε το αμέσως στον πρωκτό

Συνιστάται η εφαρμογή του υπόθετου να γίνεται όταν το άτομο βρίσκεται σε σκυμμένη ή καθιστή θέση.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Εάν το ορθικό υπόθετο είναι πολύ μαλακό για να εισαχθεί στον πρωκτό (ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες), πριν το αφαιρέσετε από το πλαστικό περιβλήμα, παγώστε το στο ψυγείο για 15 λεπτά.

6. Προειδοποιήσεις

- Να μην χρησιμοποιείται από άτομα που είναι αλλεργικά σε οποιοδήποτε συστατικό του προϊόντος.
- Να χρησιμοποιείται με εξαιρετική προσοχή σε ασθενείς υποκείμενους σε αλλεργίες.
- Εάν μετά την εφαρμογή του υπόθετου υπάρξει επιδείνωση των πληγών, εμφάνιση εκζέματος ή άλλης κατάστασης στην πρωκτική περιοχή ,η οποία απουσίαζε πριν την χρήση του , διακόψτε το αμέσως και συμβουλευθείτε τον γιατρό σας. Εάν κατά την χρήση του προϊόντος υπάρξει ανακούφιση ή εξαφάνιση των συμπτωμάτων αλλά αυτά επανέλθουν μετά από 5 ημέρες, μην επαναλάβετε τη χρήση του , αλλά συμβουλευτείτε τον γιατρό σας για περαιτέρω διερεύνηση.
- Φυλάσσεται μακριά από παιδιά
- Να μην χρησιμοποιείται παράλληλα με άλλα πρωκτικά παρασκευάσματα
- Να μην χρησιμοποιείται μετά από την ημερομηνία λήξης του προϊόντος.

7. Φύλαξη

Φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου (15-25⁰C). Αποφύγετε την επαφή με τον ήλιο ή άλλες πηγές θερμότητας.

8. Συσκευασία

Συσκευασία που περιέχει 10 υπόθετα.

9. Παρασκευαστής

FEMI-LAB, s.r.o.,

Karpatska 3256/15, 058 01 Poprad

Σλοβακία

10. Διακίνηση

Αποκλειστική διακίνηση: CROSS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, 12ο Χλμ. Θεσ/νίκης-Μουδανιών, Τ.Κ 57001, ΤΘ 60632 , Τηλ: 2310909656, fax :2310909523, e-mail:info@crosspharma.gr, website: www.crosspharma.gr